

P08 Laser SmartShield™

(患者用使い捨て IPL 保護シールド P08 IPL スマートシールド)

IPL SmartShield は、IPL(Intense Pulsed Light) 処置の間、患者の目を光からしっかりと保護いたします。弱粘性なので、取り付けも取り外しも簡単に行えます。さらにプルタブ部分は折り畳めるので、顔表面への密着度を最大限に高めることができます。



- 使い捨てタイプ
- ラテックスフリー及び低アレルギー性
- マイクロクリスタルピーリング処置に対応
- 1箱 50組入り
- ISO-13485 認定工場にて製造、医療機器に適用可能な FDA 要求を満たしています
- CE 認証取得済み
- 次の特許のうち1つまたはそれ以上によってカバーされています: US RE 39,896 E

ご注意:

1. この製品を使う前に全ての注意書きを読んでください。ご質問がございましたら、Laservision セーフティスペシャリストにご連絡ください。
 2. 使い捨てパッチの上、または上方で直接 照明装置を動作させてはいけません。
 3. **Lumenis One や Palomar MaxG のような高エネルギーの IPL システムを使ってもいいけません。** 詳しい情報をお求めの方は、Laservision セーフティスペシャリストにご連絡ください。
 4. この製品は、ほとんどの目のサイズをカバーするように設計されています(※)。眼窩エリア全体を覆って注意深く取り付けることと、補助的な光源を使って取り付け位置をチェックすることが必要です。
 5. この製品は**レーザー処置で使ってもいいけません。**
 6. 患者の眼窩エリアへの Laser SmartShield の粘着性をテストしてください。
 7. IPL が動作している間、Laser SmartShield を取り外してはいけません。
 8. IPL SmartShield は使い捨て製品ですので、一度使った物は再使用しないでください。
 9. 全ての注意や取扱説明の遵守の不履行は、深刻な目の傷害を引き起こしたり、失明に至る危険性があります。
- (※)この製品は、23 mm x 40 mm 以上の目の大きさの患者には適しません。目は金属の遮断物でカバーしなければいけません。

ご使用方法:

1. IPL SmartShield を扱う前に手をきれいに洗ってください。
2. 患者のまぶたとその周辺をきれいにし、よく乾かしてください。
3. 患者にゆっくりとまぶたを閉じてもらってください。
4. 紫のタブを持ち、患者の眼窩エリアを覆うようにパッチを中心に置いてください。
5. 取り付け部に光の隙間が無いようにするために、患者の眼窩エリアの上にある IPL SmartShield を軽く押してください。
6. もう片方の目にもステップ 4-5 を繰り返してください。
7. 光が見えないことを患者と一緒に確認するために、患者の眼窩の目のエリアの上に、補助の明るい光を当ててください。
8. 一度処置を終えたら、IPL を消して IPL SmartShield をゆっくりと取り外してください。



販売代理店

サンインストルメント株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-26-9

TEL:03(5436)9361 FAX:03(5436)9364

HP <http://www.sun-ins.com> E-mail sun@sun-ins.com